

Рекомендации по экспресс-ремонту пульта испытываемого УПДК.

Состав ремкомплекта:

1. Тряпочка (плотная, чтобы не оставались нитки или ворс).

Таблица неисправностей

Неисправность	Причина	Ремонт
Залипает кнопка	Забилась грязью	п.1

1. **Если залипает кнопка**, то необходимо:

- 1.1. Снять цветной колпачок кнопки. Для этого на колпачке с двух сторон есть специальные выемки, зацепив за которые, колпачок легко снять (см. рис.1).



Рисунок 1.

- 1.2. Протереть влажной тряпкой загрязненную поверхность до удаления загрязнения.
- 1.3. Вставить колпачок в кнопку **ДО ЩЕЛЧКА**.